

Post 10.1.1

Handbike Heinzmann

Art.nr. 2409

HMS: 210540

### Montering av forhjul med motor

- a. Før hjulet opp inn i gaffel  
NB: Pass på at bremseskiver faller på plass mellom bremseklossene i caliper
- b. Posisjoner hjulets nav i forhold til bunn av gaffel.
- c. Fest hjulmutrene

### Merknad:

Vinkel på hjul må stå 90 grader i forhold til bakke. For justering av hjul, se Kettwieser manual

- d. Hovedkabel motor kobles til hovedkabel fra hjul
- e. Hovedkabel display kobles til hovedkabel fra styre
  - i. Bruk gjerne krympestrømpe for å hindre at kontaktene glir fra hverandre




### FORSIKTIG

Ikke bruk makt når du kobler sammen ledningene – slike at du ikke bryter i stykker kontakten



### Montering av batteri

1. Når du får sykkelen ligger batteriet som regel løst
2. skru fast batteriet der skruene er plassert

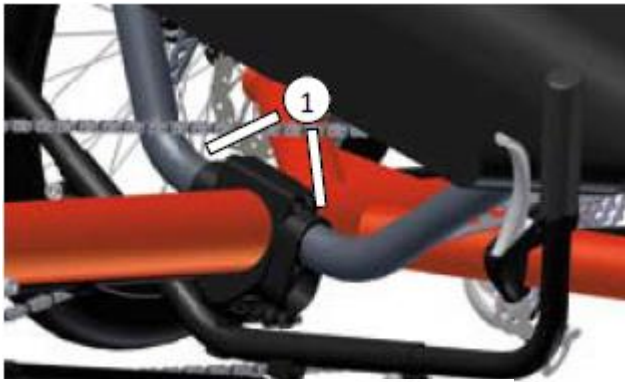

## Montering av sete

1) Fest setebøyle over tapp på den ene siden av ramme feste (1), og så over tapp

til setebøyle klikker på plass.

Fest med to bolter (2) som vist på tegning.

Fest sete med de to hurtigfestene (3) og skru til

Kontroller at ledning for baklys er montert



### Merknad:

Sete bør tilpasses brukeren. For justering av sete, se Kettwieser manual



## Montering av styre

1. Løft opp styre.

2. Løft opp høydejusteringsstanga

3. Skyv opp fjæren slik at kulen vises

4. Plasser kulen (på høydejusteringsstanga) i hullet på bommen

5. Slipp fjæren slik at den går tilbake til utgangsposisjon

6. Styret skal nå være låst.