

LEPUS med Heinzmann

MONTERINGSANVISNING

POST 11.2.1

Lepus Heinzmann

Art.nr. 2414

HMS: 210545

Montering av forhjul med motor

1. Før hjulet opp inn i gaffel

NB: Pass på at bremseskiver faller på plass mellom bremseklossene i caliper

2. Posisjoner hjulets nav i forhold til bunn av gaffel.
3. Fest hjulmutrene

Merknad:

Vinkel på hjul må stå 90 grader i forhold til bakke. For justering av hjul, se Lepus manual

4. Hovedkabel motor kobles til hovedkabel fra hjul
5. Hovedkabel display kobles til hovedkabel fra styre
 - i. Bruk gjerne krympestrømpe for å hindre at kontaktene glir fra hverandre

FORSIKTIG

Ikke bruk makt når du kobler sammen ledningene – slike at du ikke bryter i stykker kontakten



Montering av batteri

1. Når du får sykkelen ligger batteriet som regel løst
2. skru fast batteriet der skruene er plassert



Montering av sete

Fest seteøygle over tapp på den ene siden av ramme feste (1), og så over tapp til seteøygle klikker på plass. Fest med to bolter (2) som vist på tegning. Fest sete med de to hurtigfestene (3) og skru til

Kontroller at ledning for baklys er montert

Merknad:

Sete bør tilpasses brukeren. For justering av sete, se Lepus manual

